



# VACUETTE®

## Сечова система

Практичне рішення для  
стандартизованої преаналітики

# VACUETTE® Сечова система

Кожен зразок сечі потенційно є інфекційним. За допомогою закритої сечової системи VACUETTE® можна забезпечити збирання гігієнічних зразків та лабораторну обробку.

## ✓ Покращена гігієна

Підвищена безпека для персоналу лабораторій та лікарень завдяки використанню закритої системи.

## ✓ Високоєфективний та економічний

Збір, транспортування, центрифугування, аналіз та зберігання можна проводити в одній стерильній пробірці.

## ✓ Безпечний і зручне транспортування

VACUETTE®пробірки для сечі герметично закриті, стерильні, практично не ламаються і упаковані в компактні штативи.

## ✓ Вища якість

Стерильні VACUETTE®пробірки для сечі мають точне дозування і відповідають найвищим стандартам якості.

## ✓ Забруднення практично неможливе

Зараження практично неможливе при перенесенні у вторинну посудину.


## ✓ Доаналітична стандартизація

Помилки, спричинені в результаті збирання, транспортування та зберігання, зводяться до мінімуму.



## Компоненти системи

### VACUETTE® Пробірки для сечі

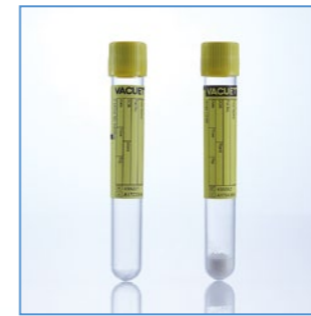

кругла основа (стерильна)



конічна основа (стерильна)

### Стаканчики для сечі



з вбудованим переносним пристроєм (стерильний)




з запобіжною пробкою (стерильна)



з кільцевою гвинтовою застібкою (стерильна)

### Пристрій для перенесення сечі

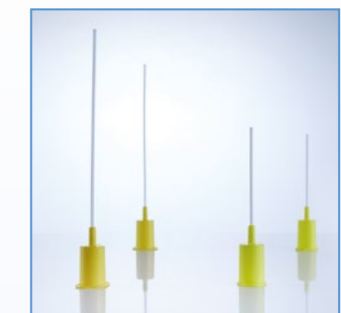

для зручності передачі зразка з ємності для збирання

### Контейнери для сечі



**VACUETTE®URI-PLUS**  
Контейнер для сечі на 24 години з вбудованим пристроєм для перенесення



**24h Urine Container**

практичне рішення для збору сечі протягом 24 годин


### Рекомендації щодо забезпечення стабільної якості зразків:


- У випадках, коли зразок залишається у склянці для сечі протягом тривалого періоду часу, слід бути обережним і ретельно перемішують, таким чином гомогенізуючи зразок перед передачею.
- Виключне використання стерильної склянки для сечі для збору сечі сприятиме зменшенню ризику зараження, що в свою чергу може покращити якість зразків.
- При використанні сечової пробірки VACUETTE® зі стабілізаторами пробірки слід кілька разів перевернути, щоб однорідно змішати сечу та консервант.
- Рекомендовані умови центрифугування для пробірок з конічним основою: 5 хв. / 400 г.





VACUETTE® Urine System

### Застосування склянки для сечі з вбудованим пристроєм перенесення\*

- 

1 Зніміть захисну наклейку з кришки.
- 

2 Вставте VACUETTE® пробірку з сечею у вбудований пристрій для перенесення сечі до повного проникнення запобіжної пробки..
- 

3 Потім сеча автоматично надходить в VACUETTE® пробірку відповідно до точно заданого вакуума. Вийміть заповнену VACUETTE® пробірку з сечею з вбудованого пристрою для перенесення сечі в кришці склянки для сечі.
- 

4 Кілька разів переверніть VACUETTE® пробірку для сечі і замініть захисну наклейку на кришці склянки, щоб запобігти травмам голкою під час утилізації. Утилізуйте стакан для сечі з вбудованим пристроєм для перенесення сечі.

\*For further collection devices, see table on page 7 and always refer to the correspondent Instructions for Use (Item No. 980205, 980246) on [www.gbo.com](http://www.gbo.com)

## Огляд типів пробірок та областей їх застосування

**VACUETTE®** пробірка для сечі без добавки, кругла основа:

Ця пробірка може використовуватися як пробірка для збору та / або транспортний контейнер в наступних областях застосування:

- Chemical urine tests\*
- Urine test strips\*

Після збору рекомендується проводити аналіз якомога швидше. Під час переданалітичної фази на стабільність зразка впливають температура зберігання та час. Чим нижча температура зберігання, тим довше її можна зберігати. При охолодженні (до 4 °C) зразок сечі підходить для:

- Microbiological tests\*

**VACUETTE®** Пробірки CCM для сечі - з консервантом (підрахунок і культивування маннітола):

**VACUETTE®** Пробірки CCM для сечі містять порошкоподібну форму стабілізатора, яка зберігає кількість бактерій у зразку стабільною при кімнатній температурі (20-25 °C) до 48 годин. Хороша розчинність добавки швидко стабілізує зразок теурину і тому особливо підходить для випадків, коли аналіз проводиться пізніше.

Ця пробірка може використовуватися як збірний і / або транспортний контейнер в наступних областях застосування:

- Microbiological tests

**VACUETTE®** пробірка для сечі без добавки, конічна основа:

Пробірки використовуються в якості пробірки для збору та / або транспортного контейнера в наступних областях застосування:

- Urine microscopy\*

Час між збором і аналізом не повинно перевищувати 2 годин. Рекомендований матеріал для дослідження осаду під мікроскопом - середній обтічний.

	Chemical urine analysis	Urine test strips	Microbiological studies	Urine sediment
Urine without preservative, round base	+	+	+*	
Urine without preservative, conical base	+	+	+*	+
Urine CCM			+	

\* It is recommended that the analysis be carried out as soon as possible after collection.

## VACUETTE® Urine Tubes

Item No.	Nom. Vol.	Cap Colour	Ring Colour	Tube Size	Description	Packaging	
						Inner	Outer
<b>Z Urine No Additive - PREMIUM (Safety Twist Cap)</b>							
456007	6ml	yellow	yellow	13 x 100	Z Urine No Additive, Round Base	50 pcs.	1200 pcs.
<b>Z Urine No Additive - Non-ridged (Pull Cap)</b>							
456065	6ml	yellow	yellow	13 x 100	Z Urine No Additive, Round Base	50 pcs.	1200 pcs.
455227	7ml	yellow	yellow	16 x 100	Z Urine No Additive, Round Base	50 pcs.	1200 pcs.
455007	10ml	yellow	yellow	16 x 100	Z Urine No Additive, Round Base	50 pcs.	1200 pcs.
455028	9ml	yellow	yellow	16 x 100	Z Urine No Additive, Conical Base	50 pcs.	1200 pcs.
<b>Urine CCM - Non-ridged (Pull Cap)</b>							
454486	4ml	yellow	black	13 x 75	Urine CCM, Round Base	50 pcs.	1200 pcs.
456284	6ml	yellow	black	13 x 100	Urine CCM, Round Base	50 pcs.	1200 pcs.
455243	9ml	yellow	black	16 x 100	Urine CCM, Conical Base	50 pcs.	1200 pcs.
455052	10ml	yellow	black	16 x 100	Urine CCM, Round Base	50 pcs.	1200 pcs.
485511	10ml	yellow	black	16 x 100	Urine CCM, Barcode Label, Round Base	50 pcs.	1200 pcs.

## VACUETTE® Urine Accessories

Item No.	Name	Nom. Vol.	Description	Packaging	
				Inner	Outer
<b>Urine Sets (Urine Tube + Urine Transfer Device)</b>					
453070	Urine Set (16 x 100)	9ml	<b>VACUETTE®</b> Urine Tube + Urine Transfer Device (455028+450751), single-packed, Conical Base	1 set	300 sets
453050	Urine Set (16 x 100)	10ml	<b>VACUETTE®</b> Urine Tube + Urine Transfer Device (455007+450751), Round Base	1 set	300 sets
<b>Urine CCM Set (Urine CCM Tubes + Urine Transfer Device)</b>					
453031	Urine CCM Set (13 x 75)	4ml	<b>VACUETTE®</b> Urine CCM Tube + Urine Transfer Device (454486+450751), single-packed, Round Base	1 set	300 sets
453033	Urine CCM Set (13 x 100)	6ml	<b>VACUETTE®</b> Urine CCM Tube + Urine Transfer Device (456284+450751), single-packed, Round Base	1 set	300 sets
453032	Urine CCM Set (16 x 100)	9ml	<b>VACUETTE®</b> Urine CCM Tube + Urine Transfer Device (455243+450751), single-packed, Conical Base	1 set	300 sets
453034	Urine CCM Set (16 x 100)	10ml	<b>VACUETTE®</b> Urine CCM Tube + Urine Transfer Device (455052+450751), single-packed, Round Base	1 set	300 sets
<b>Urine Beakers</b>					
724320	Urine Beaker 100 ml, yellow lid, with ring screw closure, bulk-packed, sterile				300 pcs.
724300	Urine Beaker with Safety Stopper 100ml, white lid, single-packed, sterile			1 pc.	100 pcs.
724310	Urine Beaker with integrated Transfer Device 100 ml, yellow lid, single-packed, sterile			1 pc.	200 pcs.
<b>Urine Containers</b>					
724315	24h urine container, brown, with screw closure, 2.7 litre				34 pcs.
724316	<b>VACUETTE®</b> URI-PLUS, 24h urine container with integrated transfer device, 3 litre				36 pcs.
<b>Urine Transfer Devices</b>					
450251	Urine Transfer Device, short			50 pcs.	600 pcs.
450252	Urine Transfer Device, long			50 pcs.	600 pcs.
450253V1	Urine Transfer Device, short, single-packed, sterile			1 pc.	400 pcs.

Your **Power** for Health

  
greiner bio-one



**Austria (Main Office)**

Greiner Bio-One GmbH  
Phone +43 7583 6791-0  
Fax +43 7583 6318  
E-Mail [office@at.gbo.com](mailto:office@at.gbo.com)

For further information, please visit our website [www.gbo.com/preanalytics](http://www.gbo.com/preanalytics) or contact us.

**Brazil**

Greiner Bio-One Brasil  
Phone +55 19 3468-9600  
Fax +55 19 3468-9621  
E-Mail [office@br.gbo.com](mailto:office@br.gbo.com)

**Hungary**

Greiner Bio-One Hungary Kft.  
Phone +36 96 213 088  
Fax +36 96 213 198  
E-Mail [office@hu.gbo.com](mailto:office@hu.gbo.com)

**Netherlands**

Greiner Bio-One B.V.  
Phone +31 172 4209 00  
Fax +31 172 4438 01  
E-Mail [info@nl.gbo.com](mailto:info@nl.gbo.com)

**Thailand**

Greiner Bio-One Thailand Ltd.  
Phone +66 38 4656 33  
Fax +66 38 4656 36  
E-Mail [office@th.gbo.com](mailto:office@th.gbo.com)

**China**

Greiner Bio-One Suns Co., Ltd.  
Phone +86 10 83 55 19 91  
Fax +86 10 63 56 69 00  
E-Mail [office@cn.gbo.com](mailto:office@cn.gbo.com)

**India**

Greiner Bio-One INDIA Pvt., Ltd.  
Phone +91 120 375 9291  
E-Mail [info@gboindia.com](mailto:info@gboindia.com)

**Portugal**

VACUETTE Portugal S.A.  
Phone +351 252 647 721  
Fax +351 252 647 722  
E-Mail [info@vacuette.pt](mailto:info@vacuette.pt)

**Turkey**

Greiner Bio-One Turkey  
Phone +90 216 576 6004  
Fax +90 216 576 6005  
E-Mail [office@tr.gbo.com](mailto:office@tr.gbo.com)

**France**

Greiner Bio-One SAS  
Phone +33 1 69 86 25 25  
Fax +33 1 69 86 25 35  
E-Mail [accueil@gbo.com](mailto:accueil@gbo.com)

**Italy**

Greiner Bio-One Italia S.r.l.  
Phone +39 02 9438 3340  
Fax +39 02 9438 3366  
E-Mail [office@it.gbo.com](mailto:office@it.gbo.com)

**Spain**

Greiner Bio One España, S.A.U.  
Phone +34 91 652 77 07  
Fax +34 91 652 33 35  
E-Mail [info@es.gbo.com](mailto:info@es.gbo.com)

**United Kingdom**

Greiner Bio-One Ltd.  
Phone +44 1453 8252 55  
Fax +44 1453 8262 66  
E-Mail [info@uk.gbo.com](mailto:info@uk.gbo.com)

**Germany**

Greiner Bio-One GmbH/Preanalytics  
Phone +49 7022 948-0  
Fax +49 7022 948-514  
E-Mail [office@de.gbo.com](mailto:office@de.gbo.com)

**Japan**

Greiner Bio-One Co. Ltd.  
Phone +81 3 3505 8875  
Fax +81 3 3505 8945  
E-Mail [info@jp.gbo.com](mailto:info@jp.gbo.com)

**Switzerland**

Greiner Bio-One VACUETTE  
Schweiz GmbH  
Phone +41 7 12 28 55 22  
Fax +41 7 12 28 55 21  
E-Mail [office@ch.gbo.com](mailto:office@ch.gbo.com)

**USA**

Greiner Bio-One North America Inc.  
Phone +1 704 261-7800  
Fax +1 704 261-7899  
E-Mail [info@us.gbo.com](mailto:info@us.gbo.com)

