



300043814-1020

ІНСТРУКЦІЇ З ВИКОРИСТАННЯ**Ножі офтальмологічні****ОПИС**

Ножі офтальмологічні – стерильні медичні вироби одноразового використання, призначені для використання при оперативних втручаннях в офтальмології.

ЗАПОБІЖНІ ЗАХОДИ ТА ЗАСТЕРЕЖЕННЯ

НЕ використовуйте повторно. Не стерилізуйте повторно. Не використовуйте вміст упаковки, якщо стерильна упаковка або стерильний бар'єр пошкоджені, або будь-яким чином порушена їх герметичність. Ножі офтальмологічні призначені для використання тільки для однієї процедури. Повторне використання або неналежне використання можуть призвести до створення потенційно небезпечних умов для пацієнта. Потенційний ризик від багаторазового використання або після повторної обробки виробу: зниження ріжучої здатності, проникнення сторонніх часток в око. Не містить натурального латексу.

Компанія Алкон не несе жодної відповідальності за ускладнення, які можуть виникнути в результаті повторного або неправильного використання виробу.

ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО СЕРЙОЗНІ ІНЦИДЕНТИ

Про будь-які серйозні інциденти, які можуть обґрунтовано розглядатися як пов'язані з використанням виробу, слід повідомляти в компанію Alcon Laboratories, Inc.:

За телефоном:

Зверніться до регіонального представництва у Вашій країні.

Веб-сайт:

<https://www.alcon.ua/uk/contact-us>

Email:

qa.complaints@alcon.com

Для можливості ідентифікації кожен медичний виріб має номер партії, який забезпечує їх ідентифікацію, цю інформацію необхідно надати компанії Alcon.

ПРИМІТКА: У ЄС, про серйозні інциденти необхідно також повідомляти відповідним органам, що здійснюють нагляд за медичними виробами у відповідній країні ЄС.

УМОВНІ ПОЗНАЧЕННЯ, ЯКІ ВИКОРИСТОВУЮТЬСЯ ДЛЯ МАРКУВАННЯ

	Використати до		Відкривати тут
	Не використовувати, якщо стерильний бар'єр або упаковка пошкоджені		Тільки для одноразового використання – не підлягає повторному використанню
REF	Номер за каталогом		Не підлягає повторній стерилізації
LOT	Номер партії		Виробник
QTY	Кількість		Дата виготовлення
STERILE R	СТЕРИЛЬНО – стерилізовано випромінюванням		Застереження: Федеральний закон США дозволяє продаж даного виробу лікарям або за призначенням лікаря.
STERILE EO	СТЕРИЛЬНО – стерилізовано оксидом етилену		
STERILE	СТЕРИЛЬНО		
EC REP	Уповноважений представник в ЄС	MD	Медичний виріб
	Див. інструкції з використання		Єдина система стерильного бар'єру

EC REP

Alcon Laboratories Belgium
Lichterveld 3, 2870
Puurs-Sint-Amands, Belgium /
Алкон Лабораторізі Белджім
Ліхтервельд 3, 2870
Пуурс-Сінт-Амандс, Бельгія

CE 0123

Alcon Laboratories, Inc.
6201 South Freeway,
Fort Worth, Texas, 76134-2099, USA /
Алкон Лабораторізі, Інк.
6201 Сауз Фривей,
Форт-Уерт, Техас, 76134-2099, США

Вироблено у США з використанням глобальних матеріалів

Уповноважений представник в Україні:

ТОВ «Алкон Україна»
Україна, м. Київ, 03022,
вул. Амурська, 6-Л корпус 5, офіс 5601
Тел. (044) 494-25-53

РЕД. 300043814

Дата останнього перегляду: 2020-10

© 2020 Alcon Inc.

300043814-1020

Alcon PACKAGING **ENABLE OVERPRINT PREVIEW!**

FILE NAME: 300043814_DFU_Cutting Instruments_UA
ARTIST: Gerald Grace
ART REV: A
DATE: 05.01.2021
SPECIAL INSTRUCTIONS: SPECIAL INSTRUCTIONS GO HERE

VENDORS PLEASE READ BELOW

COATING = 38 – 60 gloss units as measured by BYK-Gardner Micro-Gloss 60° gloss meter or similar device.
HIGH GLOSS COATING = No less than 75 gloss units as measured by BYK-Gardner Micro-Gloss 60° gloss meter or similar device.
MATTE COATING = No greater than 25 gloss units as measured by BYK-Gardner Micro-Gloss 60° gloss meter or similar device.



By Gerald Grace

7:53 am, Jan 05, 2021

